



Testeur Varroa

Manuel d'utilisation

Etape 1

- Collectez 200 abeilles (environ 25 g) provenant de vos cadres de couvain et les insérer dans votre testeur.
- Faites bien attention à ne pas capturer la reine!
- La démarcation rouge vous aide à déterminer la quantité d'abeilles nécessaire.

Etape 2

- Retournez le testeur. Insérez le co2 dans le trou à l'aide du pistolet, appuyez durant 4-6 secondes, puis attendez 10 à 20 secondes.

N.B : assurez-vous que les 2 couvercles soient bien fermés avant d'injecter la dose de co2

Etape 3

- Les abeilles sont ainsi paralysées. Retournez et secouez le testeur délicatement pendant 10 secondes.

Etape 4

- Les varroas vont alors tomber au travers de la grille, facilitant ainsi le comptage.
- Votre traitement dépendra alors du nombre de varroa

Etape 5

- L'opération terminée, ouvrez le couvercle pour permettre aux abeilles de se réveiller, et remettez-les à l'intérieur de la ruche.

Lavez le testeur avec de l'eau chaude et du savon

Hauteur: 15 cm

Diamètre: 10 cm

Pistolet co2

2 cartouches de 16g pour environ 12 tests.